

## Warm Up

### Wohlige **WÄRME** für Ihre Gesundheit

Das wiederverwendbare Wärmekissen wurde in Zusammenarbeit mit Sportlern, Trainern, Masseuren und Sporttherapeuten entwickelt. Seine Fähigkeit, auf den Punkt genau und ohne Zuhilfenahme externer Energiequellen Wärme zu erzeugen, findet vielseitige Anwendungsmöglichkeiten, wie z. B. in der Physiotherapie, zum Aufwärmen an kalten Tagen, vor bzw. nach dem Sport, nach der Arbeit, in der Freizeit, zur Linderung bei Muskelschmerzen, Rückenschmerzen, Rheuma, Prellungen, Verspannungen, Gelenksverletzungen, Unterleibsbeschwerden oder Erkältungskrankheiten.



### **WÄRME** auf Knopfdruck, wann und wo immer Sie wollen

Warm Up® benötigt keinen Strom, kein Vorheizen und bringt den Nutzen von wohliger Wärme, wo und wann immer Sie diese brauchen. Knicken Sie das Plättchen ein oder mehrmals (keine Angst, es bricht nicht). innerhalb von Sekunden wird Warm Up® bis ca. 50°C warm.

Bei richtiger Pflege ist Warm Up® hunderte Male wieder verwendbar. Zur Wiederaufbereitung einfach 15 Minuten in sprudelndem Wasser kochen. Nach dem Auskühlen ist Warm Up® sofort wieder einsatzbereit.

Für die Aufbereitung in Praxen empfehlen wir den praktischen Einkochvollautomat mit Temperaturregler. Einfach Wasser einfüllen, die Warm Up®-Produkte hineinlegen und 15 Minuten kochen lassen.

