

# AXTAIR Wechseldruckmatratze

Vorbeugung und Behandlung von Dekubitus

Die Matratze besteht aus 18 Luftkammern von jeweils 12 cm Höhe. Mit Ausnahme der 3 statischen Luftkammern des Kopfteils können die Zellen alternierend aufgeblasen werden. Als Unterlage dient eine 5 cm dicke Schaumstoffauflage. Die Matratze ist durch einen abziehbaren, flüssigkeitsundurchlässigen und atmungsaktiven Bezug mit integriertem Kopfkissen geschützt. Dank des CPR Ventils kann die Matratze im Notfall innerhalb von 15 Sekunden entleert werden.



- Automatische Druckberechnung, auf den Patienten abgestimmt
- Klinisch bewährt für die Behandlung von Dekubitus der Stadien 1 bis 4. Drei Betriebsarten für eine optimale Pflege des Patienten.
- Sicht- und hörbarer Alarm bei Kompressorproblemen
- CPR Sicherheitsventil für eine schnelle Entleerung
- Für Personen bis 130 kg geeignet/einsetzbar

## Wirkungsvoll und überzeugend

Das Prinzip der Druckveränderung der Axtair Matratze spart Zeit bei der Mobilisierung und schafft so mehr Zeit für die übrigen pflegerischen und therapeutischen Massnahmen für die optimale Pflege des Patienten.

- Zykluswechsel alle 7 Minuten: 3000 Mal innerhalb von 24 Stunden verändern sich die Druckpunkte.
- Die geringe Druckschnittstelle (75% der Werte <35 mmHg über 80% des Zyklus), fördert die Geweberegeneration für Dekubitus bis zur Stufe 4.


## Einfach und angenehm

Dank dem einfachen Handling der Matratze und der zuverlässigen Überwachung über das LCD-Display ist das Produkt für das Pflegepersonal angenehm zu bedienen. Da der Kompressor sehr leise arbeitet und die Lichtstärke des Displays nach 30 Minuten automatisch reduziert wird, wird der Patient in Schlaf- und Ruhezeiten nicht gestört.

## Drei Betriebsarten für die optimale Pflege des Patienten

<p><b>1 – Dynamischer Modus</b> Alternierung von 2 Zellen (ausser den drei Zellen im Kopfteil), Zykluswechsel alle 7 Minuten: 3000 Druckpunktveränderungen innerhalb von 24 Stunden.</p>	<p><b>2 – Statischer Modus</b> Alle Zellen der Matratze werden mit konstantem, geringem Druck gefüllt, was das Einsinken des Patienten in die Matratze begünstigt, die Auflagefläche vergrössert und auf diese Weise den Druck (Interface) reduziert.</p>	<p><b>3 – Pflegemodus</b> Die Oberfläche der Matratze wird straff, um die Mobilisierung des Patienten während der Pflege oder beim Aufstehen zu erleichtern. Nach 30 Minuten wird automatisch zum vorhergehenden Modus gewechselt.</p>
--	---	--

## Übersichtliches Kontrolldisplay

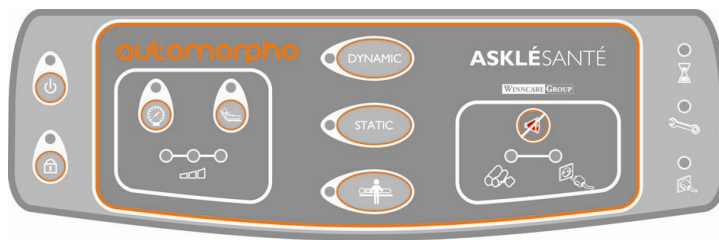

Dank der anpassbaren Haken passt der Kompressor an verschiedene Betten.



## Zubehör

<p>Griffband über die gesamte Breite der Matratze.</p>	<p>Pumpe für ein schnelles Aufblasen der Matratze (weniger als 2 Minuten) *</p>	<p>Einfacher Transport dank praktischer Tasche</p>

## Technische Daten

<b>Art. Nr.</b>	VAXT4AUTO
<b>Grösse:</b>	200 x 90 x 17 cm
<b>Überzug:</b>	Promust PU HD, an 3 Seiten offen
<b>Patientengewicht:</b>	30 – 130 kg
<b>Feuernormen:</b>	EN 597-1 und 2
<b>Garantie:</b>	2 Jahre



**Meliseptol® Foam pure**  
Für sanfte und schnelle Desinfektion  
Nur eine Minute Einwirkzeit  
Art. Nr. 19171 / 750 ml

\* Nur auf Bestellung lieferbar

Die Ersatzteile finden Sie auf der Folgeseite der Preisliste.